

Kolay Kullanım Kartı

Hasta Yükleme (Toplu)

V XXXX
HAZIR



TOPLU



TARA



20 sn.



BAŞLAT



Not:

- Cihaz tüpleri otomatik olarak karıştırır
- Çalışma başladıktan sonra yeni tüp eklenemez.
- Okuma süresi 20 dk.

Sonuç Bulma

ANA SAYFA



SONUÇLAR



TÜMÜ



Cihaz	Zaman	pozisyon	Örnek Numarası	Seriyel	ESR	18°C Dışartışlığı	Sıcaklık
VA0156	2017-01-02 13:06	6	94924	35.3 mm	2 mm/h	2 mm/h	25.7 +/- 0.5 °C
VA0156	2017-01-02 13:06	5	92209	32.5 mm	2 mm/h	2 mm/h	25.7 +/- 0.5 °C
VA0156	2017-01-02 13:06	4	93369	35.3 mm	4 mm/h	3 mm/h	25.7 +/- 0.5 °C
VA0156	2017-01-02 13:06	3	99309	33.0 mm	6 mm/h	4 mm/h	25.7 +/- 0.5 °C
VA0156	2017-01-02 13:06	2	801075	33.8 mm	2 mm/h	3 mm/h	25.7 +/- 0.5 °C
VA0156	2017-01-02 13:06	1	801074	29.0 mm	3 mm/h	3 mm/h	25.7 +/- 0.5 °C
VA0156	2017-01-02 12:37	8	95375	35.0 mm	2 mm/h	3 mm/h	25.6 +/- 0.8 °C
VA0156	2017-01-02 12:37	7	95376	34.0 mm	3 mm/h	5 mm/h	25.6 +/- 0.8 °C
VA0156	2017-01-02 12:37	6	1091021	35.0 mm	6 mm/h	5 mm/h	25.6 +/- 0.8 °C
VA0156	2017-01-02 12:37	5	933660	34.8 mm	19 mm/h	14 mm/h	25.6 +/- 0.8 °C

Not:

- Geriye dönük 10.000 hasta sonucu hafızada saklanabilir.
- Hafızada bulunan sonuçlar örnek numarasına ve tarih aralığına göre sorgulanabilir.